

HW
HealthWare

Ungderm



FEEL YOUR SKIN

**HEALTHWARE
PROFESSIONAL**

HYALURONIC ACID GEL

HEALTHWARE TIERA BIOTECHNOLOGY

QUE ES UNGDERM

El ácido hialurónico

Es un gel de ácido hialurónico estabilizado superior **no-animal**. El ácido hialurónico es un polisacárido y es una de las pocas sustancias que es idéntica en todas sus especies y tipos de tejido. El ácido hialurónico existe en nuestros cuerpos y su función más importante es transportar y ligar agua. Juega un rol muy importante, le da volumen a la piel, le da forma a los ojos y elasticidad a las articulaciones. Los nutrientes, el oxígeno y las hormonas pueden pasar libremente entre las partículas de gel y los tejidos, dejando la piel con una apariencia natural y saludable. Cuando el gel comienza a degradarse el agua toma su lugar y es absorbido totalmente desaparece sin ningún rastro en el cuerpo. Su proceso de bio degradación es natural y seguro.

NO ANIMAL

No-animal, no hacen falta pruebas

Ya que el ácido hialurónico es idéntico en todos los organismos vivos, ofrece una bio-compatibilidad muy alta. Ungderm no usa animales como fuente. Por lo contrario, es producido bio tecnológicamente por medio de fermentación bacteriana. Por ende, no existen los riesgos de transmisión de enfermedades entre las especies, o de producir reacciones alérgicas en pacientes que son sensibles. Esto procura aun otro beneficio de mucha importancia: No necesita pruebas de piel.

LARGA DURACIÓN

Estabilizado para una larga duración

El ácido hialurónico permanece en los tejidos sólo unos pocos días sin previa modificación. Ungderm está estabilizado y posee un entre cruzamiento de segunda generación con partículas de gel, lo cual genera efectos de más larga duración con una interferencia mínima en los tejidos. Los nutrientes, el oxígeno y las hormonas pueden pasar libremente entre las partículas de gel y los tejidos, dejando la piel saludable durante todo el periodo de permanencia en esta.

No permanente

Biodegradable, natural y seguro

El método de estabilización, es increíblemente efectivo, permite mantener más volumen con menos material durante un periodo de tiempo más largo. En tanto, el ácido hialurónico se va degradando, cada molécula va progresivamente ligando más agua. Esto es conocido como degradación isovolémica. En términos prácticos quiere decir que el volumen del implante es mantenido hasta que el ácido hialurónico se haya degradado casi completamente. Ya que el cuerpo tiene su propio sistema de absorción del ácido hialurónico. Desaparece con el tiempo sin dejar rastros.

-Producto certificado UNGDERM® cuenta con estándares de control de calidad rigurosos y certificaciones:

-ISO13485

-SFDA


-ISP SDDM /1632/14 Chile

La nueva formulación de UNGDERM


Cada producto UNGDERM contiene una alta concentración de **24 mg/ml** de ácido hialurónico entrecruzado, con partículas de gel, para una mayor duración y seguridad. Más de 30 millones de pacientes alrededor del mundo han sido tratados con productos basados en el ácido hialurónico. Su calidad y seguridad está bien establecida.

Resultado Clínico de duración

De acuerdo con los datos de la evaluación clínica, en la investigación clínica de 24 semanas de duración (diseñado al azar y doble enmascarado) el porcentaje de mejora obvia en los sitios de inyección, que son líneas naso-labiales, arrugas de cola de pez, arrugas frontales, cicatriz de depresión, arrugas de glabella, etc. es de 65,1% a 82,09%

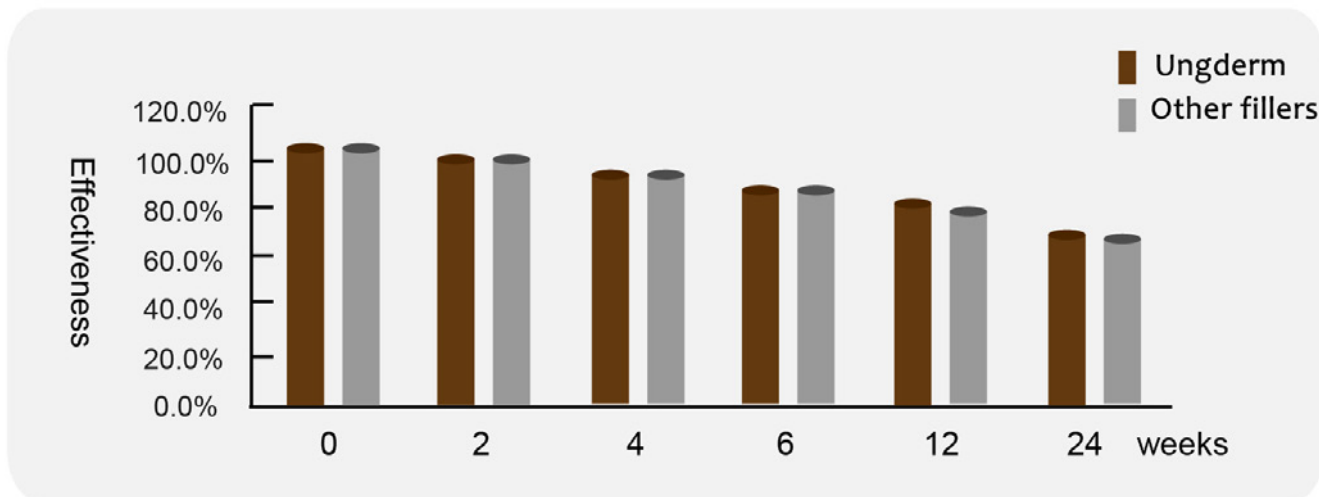

Resultados pueden durar hasta 18 meses luego de la aplicación con corrección notable a hasta un (60%) los 24 meses.

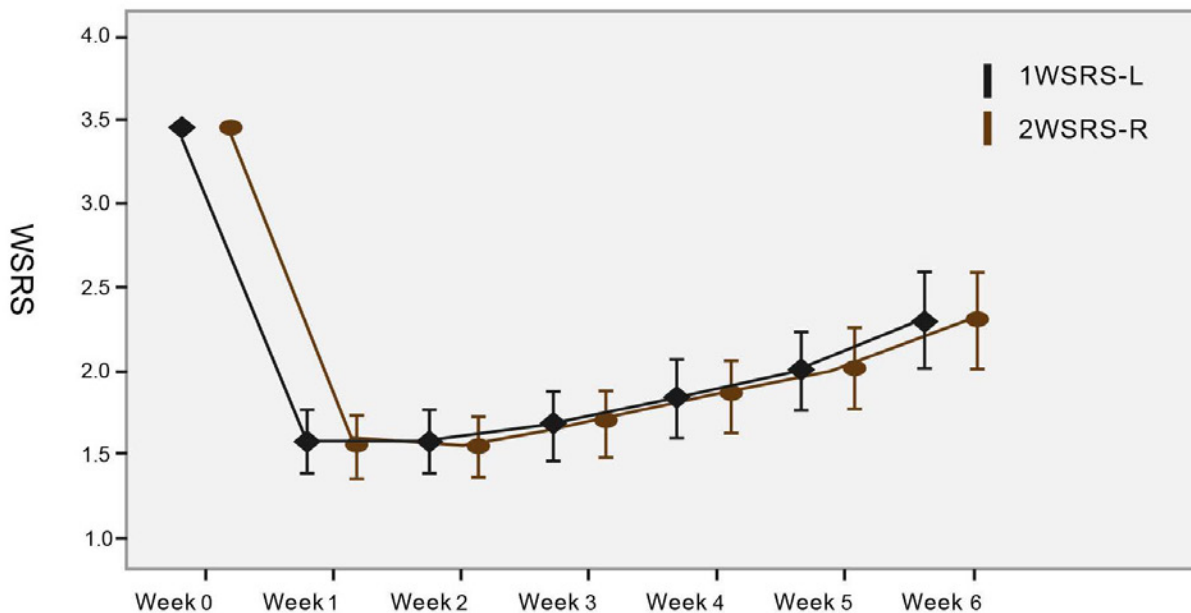

Uso previsto Deep I

Suavizar arrugas y pliegues finos

Se puede lograr suavizar óptimamente, líneas periorales y las comisuras orales, relacionadas con el envejecimiento de la piel, un pliegue menos profundo puede ser tratado con UNGDERM® Deep I. Muchos pacientes desean un retoque en sus resultados. Esto puede hacerse por medio de una serie de sesiones usando el mismo producto.

Deep I 1ml / 2 ml

- No duele al inyectar, contiene lidocaína.
- Concentración: **24 mg /ml.**
- Agujas 2x27 G
- Más partículas de gel: **0.1-0.15 mm**
- Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
- Larga duración hasta 6 meses.**
- Superficial, patas de gallo, peri oral, líneas finas.



Deep I y II densidad fina y media



Usos previstos Deep II

Moldeado de labios

Muchos pacientes desean labios más voluminosos, un look más sensual o realce del área del borde bermellón. UNGDERM® Deep II es ideal para redefinir el look del paciente en lo que respecta a los labios, líneas de expresión, y perfilamientos.

Modelado de contornos faciales y perfilamientos

Al momento de crear volumen en los contornos de la cara o corregir líneas, UNGDERM® Deep II es la elección correcta. Levanta la piel de las mejillas y mentón agregando volumen en la capa media de la dermis y/o capa superior subcutánea. El gel suave, visco elástico biodegradable se adapta a los tejidos que lo rodean



Deep II 1ml / 2 ml

- No duele al inyectar, contiene lidocaína.
- Concentración: **24 mg /ml.**
- Aguja: 2x27 G.
- Más partículas de gel: **0.1-.28 mm.**
- Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
- Larga duración hasta 6-12 meses.**
- Media, labios, pliegues, perfilamientos.

Usos previstos Deep III Relleno de labios

Muchos pacientes desean labios más voluminosos, UNGDERM® Deep III es ideal para dar volumen a los labios.

Moldeado de contornos faciales

Crear volumen en los contornos de la cara o corregir pómulos, mentón, nariz, orejas UNGDERM® Deep III es la elección correcta. Levanta la piel de las mejillas y mentón agregando volumen en la capa profunda de la dermis y/o capa superior subcutánea. El gel suave, visco elástico biodegradable se adapta a los tejidos que lo rodean.

Deep III 1ml / 2 ml

- No duele al inyectar, contiene lidocaína.
- Concentración: **24 mg /ml.**
- aguja 1x27 G, 1x26 G.
- Más partículas de gel: **0.28-0.5 m.**
- Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
- Larga duración hasta 18 meses.**
- Profunda, labios, pliegues, volúmen.



Deep III y IV densidad alta, larga duración.



Usos previstos Deep IV

Moldeado de contornos faciales

Al momento de crear volumen en los contornos de la cara o corregir mejillas hundidas, UNGDERM® Deep IV es la elección correcta. Levanta la piel de las mejillas y mentón agregando volumen en la capa profunda de la dermis y/o capa superior subcutánea. El gel suave, visco elástico biodegradable se adapta a los tejidos que lo rodean. Para un relleno profundo de larga duración.



Deep IV 1ml / 2 ml

- No duele al inyectar, contiene lidocaína.
- Concentración: **24 mg /ml.**
- Aguja 2x25 G
- Más partículas de gel: **0.5-1.25 mm**
- Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
- Larga duración hasta 18 meses.**
- Profunda, labios, pliegues, volúmen.

Ungderm

FEEL YOUR SKIN

deep II deep I

deep I

deep I deep III

deep I

deep III deep IV

deep I

deep II deep III deep IV

deep II

deep II deep III deep IV

deep II

deep II

deep II deep III deep IV

deep III deep IV

deep II deep III deep IV

deep III deep IV

HW

HealthWare

HW HealthWare

Perfil de empresa

HealthWare Limitada es una empresa que diseña, importa y distribuye productos para el área de la salud. Entre nuestros clientes se encuentran destacados médicos, clínicas privadas y hospitales públicos a lo largo de Chile y el mundo.

En nuestros inicios, la actividad se enfocaba hacia la importación de productos electrónicos y equipos médicos en general. Es con visión por el creciente interés en nuestro país por la cirugía plástica, tratamientos estéticos y otros procedimientos médicos, que el año 2006, se visualiza una posibilidad de apertura en ese mercado.

Nuestra colaboración con importantes fabricantes, las cuales cuentan con reconocimiento internacional por su calidad y profesionalismo, ha probado ser un punto fundamental para el desarrollo de nuestra actividad.

Trabajamos activamente para brindarle al cliente una amplia gama de productos, así como para optimizar el servicio y la oferta.

Nuestro objetivo es presentar al mercado una gama de productos de alta calidad. Mantener nuestra calidad radica en, lograr una estrecha relación con los clientes, implementando en nuestros productos, las sugerencias de cada uno de los profesionales con quienes nos relacionamos. Además de mantener un estricto control y seguimiento de los productos para una constante retro alimentación y mejora.

Company: Inversiones HealthWare Limitada.

RUT/ WAT: 76.630.899-6

Company address: 13 Norte 853, Oficina 803, Boulevard Marina Arauco,
Viña del Mar, Chile. CP 233000.

PH: +56-32-3143661

E-Mail: info@hw.cl

Web: www.hw.cl / covid.hw.cl / www.ungderm.com

Informacion bancaria

Inversiones HealthWare Limitada.

Cta.Cte.:058-06323-04

Rut:76.630.899-6

Bco: Banco de Chile

Notificación: pagos@hw.cl

